

Indigo System

Sistema de aspiración



Pasos del Procedimiento

1 Avanzar CAT INDIGO proximal al trombo. Retirar guía - Introducir SEP coaxial s/p

.014, .018, .035" Wire

2 Conectar tubo de aspiración IST3 (parte distal LUER-LOCK) a puerto lateral de la llave de 3 pasos.

Aspiration Tubing (sterile) RHV Side Port

3 Conectar IST3 (extremo proximal) a CANISTER - ENCENDIDO BOMBA

ON Button

4 Apertura del tubo de aspiración IST3 - ON

5* Avanzar CAT e impactar en trombo. Mantener 90" si no hay FLUJO.


Indigo Catheter marker No Flow

6* Movilizar separador - Avanzar catéter - Aspirar trombo - Restablecer flujo


Indigo Catheter marker Separator bulb marker Flow

*Retirada de CAT - Aspirando ON / Aspiración OFF al restablecer el flujo.

Sistema Triaxial para montaje

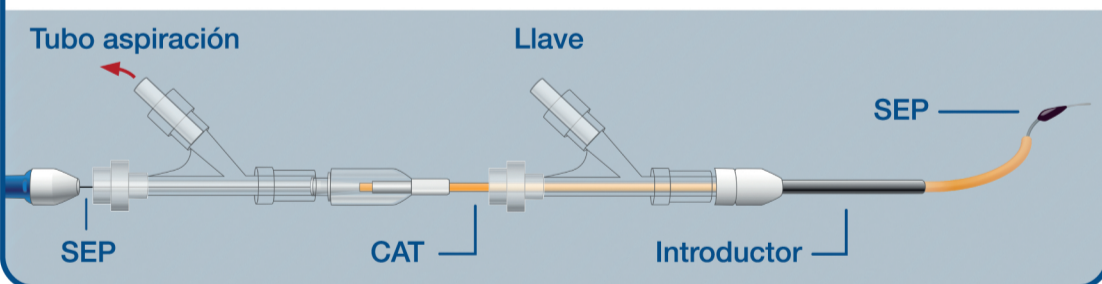

Catálogo de medidas

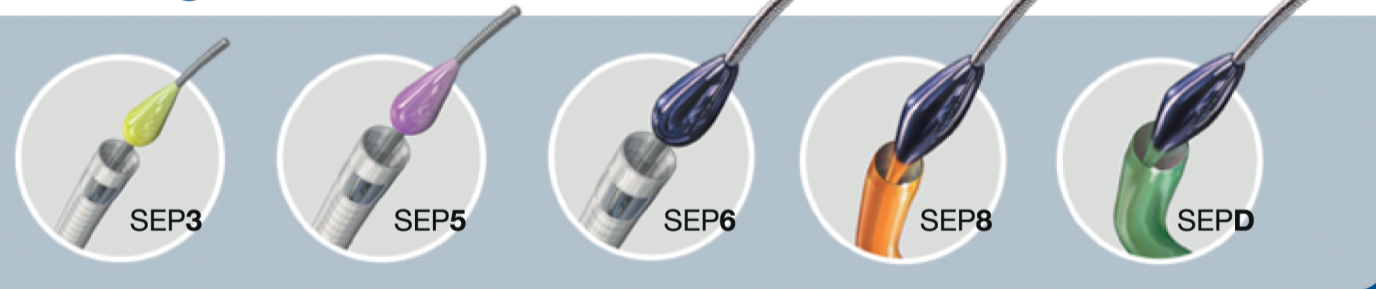

Circunferencia de aspiración

25.4 mm



XTORQ

15 mm



TORQ

2.24 mm



STR

Introdutores recomendados

	Company	Introducer	Tipo de Válvula	Longitud	French
CAT8	Terumo	Destination	Tuohy (RHV)	45 cm 65 cm 90 cm	≥ 8F
	Cook	Flexor Shuttle	Tuohy (RHV)	90 cm	≥ 8F
CAT6	Terumo	Destination	Tuohy (RHV)	45 cm	≥ 6F

Tamaños de catéter

